

Tisztítás-olajozás W&H Service Oil F1, MD-400 spray-vel

Rendeltetés

A W&H Service Oil F1, MD-400 spray alkalmas az összes W&H turbina, egyenes- és könyökdarab, sebészeti kézidarab, levegős depurátor és légmotor belső tisztítására és olajozására.



Vegye figyelembe a palack oldalán feltüntetett biztonsági utasításokat!


- > Helyezze fel a megfelelő sprayfejet a palack tetejére.
- > Használat előtt rázza fel a palackot.
- > Illessze be a sprayfejet a kézidarabba.
- > Tartsa stabilan a kézidarabot.
- > A palackot tartsa függőlegesen és kb. 1 másodpercig működtesse a fej lenyomásával.
- > Vegye figyelembe a W&H kézidarab használati utasításában az olajozással kapcsolatosan leírt tanácsokat.



Az adapteres sprayfejet vegye le a kiürült spraypalackról és őrizze meg az újonnan vásárolandó palackhoz!

32

Tisztítás-olajozás W&H Service Oil F1, MD-400 spray-vel

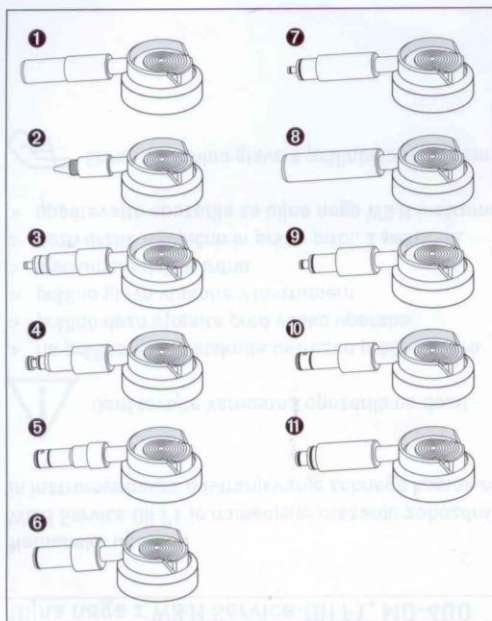

Adapteres sprayfejek

- 1 Egyenes- és könyökdarabokhoz REF 02038200
- 2 Turbinák és könyökdarabok fűrőbefogó rendszereihez valamint fix csatlakozású turbinákhoz és légmotorokhoz REF 02036100
- 3 Roto Quick csatlakozású W&H turbinákhoz, légmotorokhoz és depurátorokhoz REF 02229200
- 4 Multiflex® csatlakozás REF 04396100
- 5 A-dec LW csatlakozás REF 03522500
- 6 Midwest® csatlakozás REF 06024600
- 7 Bien Air Unifix® csatlakozás REF 05772000
- 8 NSK Mach® csatlakozás REF 05773 300
- 9 NSK QD-J® csatlakozás REF 05907800
- 10 Sirona® csatlakozás REF 05908000
- 11 StarDental HiFlo® csatlakozás REF 06024800

A Multiflex® a Kaltenbach & Voigt GmbH & Co. KG, Biberach bejegyzett védjegye.

A Midwest® a wisconsini MIDWEST DENTAL cég bejegyzett védjegye.

A BienAir Unifix® a biennei Bien-Air Dental SA cég bejegyzett védjegye.

Az NSK Mach®, NSK QD-J® a japán NSK NAKANISHI INC. cég bejegyzett védjegye.

A Sirona® a bensheimi Sirona Dental Systems GmbH cég bejegyzett védjegye.

A StarDental HiFlo® a kanadai STAR DENTAL SUPPLY Inc. cég bejegyzett védjegye.

33