


# Filtek™ Bulk Fill

Posterior Tömőanyag

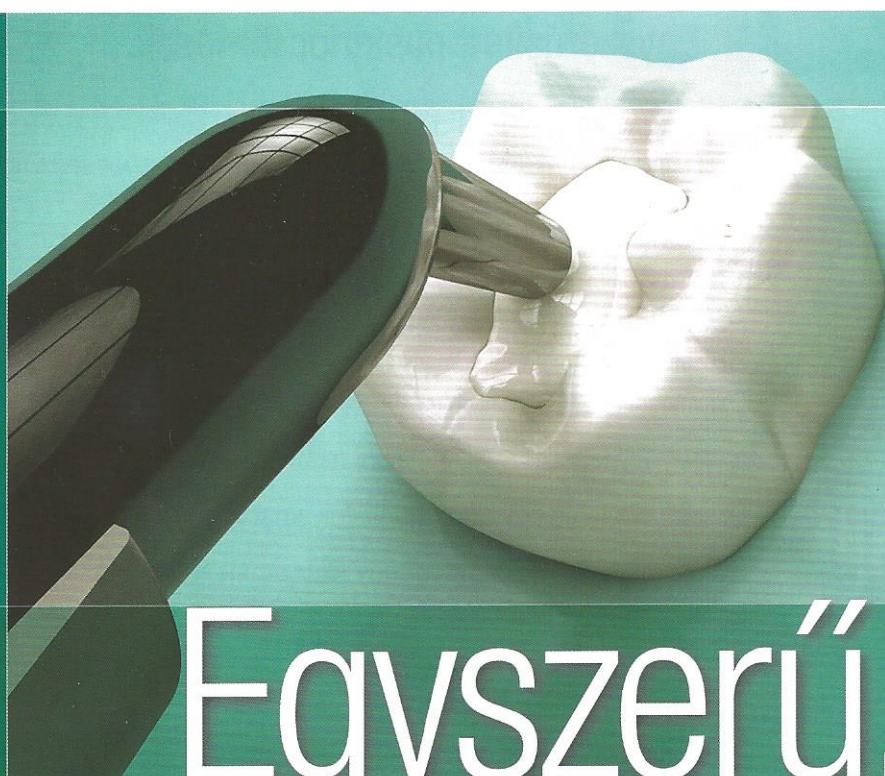

Egyszerű,  
mint az 1 x 1

**3M** ESPE



# Gyors és egyszerű



## Filtek™ Bulk Fill Posterior Tömőanyag

Egy tömegben, akár 5 mm mélységben.  
Nincs szükség drága adagolóeszközökre  
vagy időrabló rétegzésre.


Egyszerűsített posterior tömések.

Nem kérdés, hogy a bulk fill anyagok időtakarékosak, ugyanakkor a valódi egyszerűsítésbe beletartozik a bonyolult, drága adagolóeszközök kizárása, valamint a további rétegzés és többlépcsés technika elhagyása, még pedig úgy hogy az eredmény nem lesz kevésbé kopásálló és nem okoz nagyobb polimerizációs stresszt.

A Filtek™ Bulk Fill Posterior Tömőanyag az Ön egylépcsés bulk megoldása, melyet eredményeinek javítására fejlesztettünk ki úgy, hogy gyors és egyszerű posterior töméseket tegyünk lehetővé.

- ✓ Egylépcsés, nincs további fedőréteg
- ✓ Gyors és egyszerű munkafolyamat
- ✓ Stressz-csökkentés, hogy akár 5 mm mélységig lehessen polimerizálni
- ✓ Jobb in vitro kopási ellenállás a piacvezető bulk fill anyagokhoz képest
- ✓ Kiváló kezelhetőség és formálhatóság
- ✓ VALÓDI nanofiller technológia és két innovatív metakrilát monomer teszi lehetővé az alacsonyabb polimerizációs stresszt a kopási ellenállás csökkenése nélkül

Egyszerűen, csak egy lépés és kész

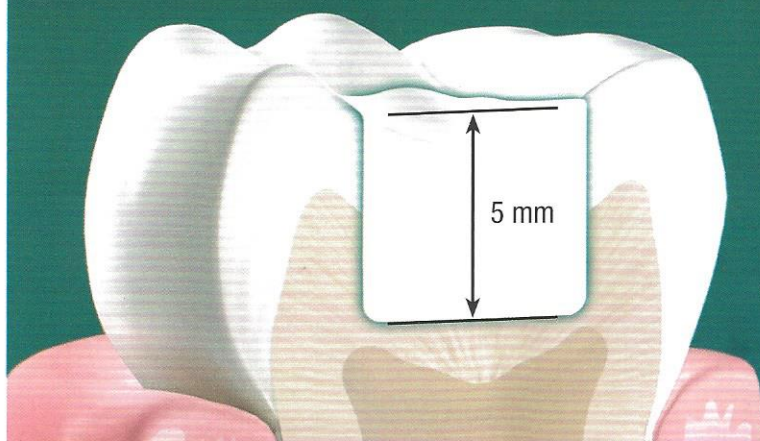

Akár 5 mm  
vastagságban feltölthető  
egy lépésben



3x10 mp polimerizáció  
három irányból  
(okkluzális, bukkális,  
lingvális)



Fogorvosokat kértünk fel, hogy négy különböző tömést készítsenek el és polimerizáljanak, majd osztályozzák az anyagokat tetszés szerint.

Egy szimulációs művelet során a Filtek Bulk Fill Posterior Tömőanyagot számos egyéb, különféle technikát igénylő tömőanyaggal versenyeztettük. Az anyagok között volt

- rétegzési technikával felhelyezendő kompozit,
- folyékony bulk fill kompozit.

## A Filtek Bulk Fill Posterior Tömőanyag kiemelkedően nyerte a versenyt

**24%-kal**  
**gyorsabb**

felhelyezési idő  
**a** rétegzési  
technikát igénylő  
kompozitokhoz képest



**2X**


annyi fogorvos  
választotta

felhelyezési technika  
szempontjából  
a Filtek™ Bulk Fill  
Posterior Tömőanyagot

**a** folyékony bulk fillhez képest

## VALÓDI nanofiller technológia és innovatív kémia

A nanoklaszter  
5.000-szeres nagyításban

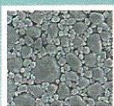

A nanoklaszter  
50.000-szeres nagyításban

A Filtek Bulk Fill Posterior Tömőanyag ugyanazt a VALÓDI nanofiller technológiát alkalmazza, amely már kiállta a próbát az idők során egyéb vezető Filtek™ tömőanyagok esetén. Ennek a technológiának nem csupán a nagy erősség köszönhető, hanem az is, hogy a töméseket gyorsan és egyszerűen lehet polírozni.

Ezen a VALÓDI nanofiller technológián kívül a Filtek Bulk Fill Posterior Tömőanyag még két innovatív metakrilát monomert is tartalmaz, amelyek kombinációja lehetővé teszi az alacsonyabb polimerizációs stresszt a kopásállóság csökkenése nélkül. Ennek a két technológiának a kombinációja eredményezi azt a könnyen használható, egy lépésben felhelyezhető tömőanyagot, amelyet az Ön posterior töméseinek egyszerűsítésére fejlesztettünk ki.

És egy régi ismerős...

# Filtek™ Bulk Fill

## Folyékony Tömőanyag

### Kiváló, alacsony stressz-szintű liner/alábélelő megoldás

Amennyiben egy nagyszerű, sokoldalú, alacsony stressz-szintű folyékony bulk fillt keres, megtalálta, ez az! A Filtek™ Bulk Fill Flowable folyékony tömőanyag akár 50 %-kal erősebb a vezető bulk fill tömőanyagokhoz képest<sup>1</sup> – és több, mint 3x akkora a kopásállósága. Kiválóan használható:

- ✓ alábélelésként I. és II. osztályú tömésekhez
- ✓ gyors bulk fill alapként akár 4 mm vastagságban I. és II. osztályú tömésekhez
- ✓ kopásálló megoldásként kicsi, nem teherviselő felszíneken III. és IV. osztályú tömésekhez

1. 3M ESPE in vitro adat.  
2. Az indikációk teljes listáját a Használati útmutatóban találja.



### Rendelési információk

#### Filtek™ Bulk Fill Posterior Tömőanyag

Termékkód	Termékleírás
4864TK	<b>Filtek™ Bulk Fill Posterior Tömőanyag kapszulás készlet</b> A készlet tartalma: 40 db 0.2 g kapszula: ebből 20 db A2 és 20 db A3; 5.0 ml fiola Single Bond™ Univerzális Adhezív, Használati útmutató; 10 db Sof-Lex™ Spirális Finírozó korong; 10 db Sof-Lex™ Spirális Polírozó korong; 1 -RA Befogóeszköz (mandrell); Technikai leírás; Használati útmutató
4863TK	<b>Filtek™ Bulk Fill Posterior Tömőanyag fecskendő készlet</b> A készlet tartalma: 40 db 4 g kapszula: ebből 20 db A2 és 20 db A3; 5.0 ml fiola Single Bond™ Univerzális Adhezív, Használati útmutató; 10 db Sof-Lex™ Spirális Finírozó korong; 10 db Sof-Lex™ Spirális Polírozó korong; 1 -RA Befogóeszköz (mandrell); Technikai leírás; Használati útmutató

#### Utántöltő

SZÍN	FECSKENDŐ	KAPSZULA
A1	4863A1	4864A1
A2	4863A2	4864A2
A3	4863A3	4864A3
B1	4863B1	4864B1
C2	4863C2	4864C2

**FECSKENDŐS UTÁNTÖLTŐ** tartalma 1 db 4 g fecskendő;  
Technikai leírás; Használati útmutató.

**KAPSZULÁS UTÁNTÖLTŐ** tartalma 20 db 0.2 g kapszula;  
Technikai leírás; Használati útmutató.

#### Filtek™ Bulk Fill Folyékony Tömőanyag

Utántöltő		
SZÍN	FECSKENDŐ	KAPSZULA
A1	4862A1	4861A1
A2	4862A2	4861A2
A3	4862A3	4861A3
Universal	4862U	4861U
Termékkód	Termékleírás	
3740T	<b>Adagolócsőr</b> 20 db 19-es méretű adagolócsőr	

**FECSKENDŐS UTÁNTÖLTŐ** tartalma 2 db 2 g fecskendő;  
Technikai leírás; Használati útmutató.

**KAPSZULÁS UTÁNTÖLTŐ** tartalma 15 db 0.2 g kapszula;  
Technikai leírás; Használati útmutató.

**3M ESPE**

3M Hungária Kft.  
1117 Budapest,  
Neumann János u. 1/E.  
Tel.: 06-1-270-7777

[www.3mespe.hu](http://www.3mespe.hu)

A 3M, az ESPE, a Filtek, a Single Bond és a Sof-Lex márkanév a 3M vagy a 3M Deutschland GmbH. tulajdonában állnak.