

Biztosítsa páciensének
az elérhető legjobb
preventív gondoskodást.

MI Paste Plus a **GC**-től.



Fogászati védőkrém szabadon hozzáférhető
kálcium, foszfát és fluorid ionokkal:
Erősít, Véd, Feltölt.

Jó hír a magas rizikójú
pácienseknek:
a „folyékony zománc”
most hozzáadott fluoriddal!

Az MI Paste Plus a GC MI
(Minimális Beavatkozás) anyag-
palettájának egy izgalmas kiegészítője.
Ez a helyileg alkalmazható krém ötvözi
a Tooth Mousse-ban megtalálható,
forradalmi Recaldent® összes előnyét,
900 ppm egyedi, szabadalmaztatott
formulájú fluoriddal egy olyan termékben,
mely a magas rizikójú pácienseknek lett
kifejlesztve.

GC EUROPE N.V.
Tel: +32.16.39.80.50
Fax: +32.16.40.02.14
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO – Hungary
H-1119 Budapest
Etele út 65.
Tel: +36.1.205.36.02
Fax: +36.1.205.36.03
hungary@eoo.gceurope.com
www.eoo.gceurope.com



Minimum
Intervention



GC

GC MI Paste Plus

A GC Tooth Mousse minden előnye + fluorid:

Miért használjon fluoridot Recaldent®-tel?

Az optimális eredmény elérése érdekében a klasszikus fluorid-tartalmú termékek a nyálban természetesen alacsony koncentrációban megtalálható kalcium- és foszfátionokat használják fel a fluorapatit képzéséhez. Azok a betegek, akik nyáltermelési elégtelenséggel (száraz száj) küszködnek, hajlamosak az ásványi anyag veszteségre, így nyálukban tipikusan a kalcium- és foszfátionok hiánya mutatkozik.

A MI Paste Plus-ban található, kazeinből származtatott CPP-ACP nagyon magas koncentrációban tartalmaz kalcium- és foszfátionokat, ezáltal segíti a fluorid hatékonyságát. Kutatások bizonyították, hogy a Recaldent® CPP-ACP (kazein-foszfopeptid – amorf kalcium-foszfát) a fluoriddal együtt sokkal hatékonyabb, mint a fluorid önmagában használva.

Tulajdonságok és előnyök

- Stimulálja a nyáltermelést, semlegesíti a külső hatásokból származó, illetve refluxból eredő szájüregi savasságot
- Csökkenti a fogfehérítés utáni érzékenységet
- Megállítja és visszafordítja a fehér foltok előtűnését a bracketek körül
- Várandósság alatt segíti az egészséges szájüregi állapot fenntartását, csökkenti a refluxból eredő savasságot és megelőzi a kariesz kialakulását
- Csökkenti a dentális eróziótól szenvedő betegeknél ill. a nem fedett gyökérfelületeken fellépő érzékenységet, megelőzi az ásványi anyagok vesztesését
- Erősíti a fogakat magas karieszrizikó vagy a nyáltermelésre kedvezőtlenül ható speciális gyógykezelés esetén
- Segítségét jelent agresszív káriesszel, erózióval vagy fokozott fogkopással (pl. sugárterápia után) küzdő betegek esetében
- Kiváló ízű, használata kellemes érzést nyújt a páciensek elégedettségének és kényelmének növelése érdekében

Alkalmazása


Az MI Paste Plus ideális olyan fogászati kezeléseket követően, mint pl. a gyökérsimítás, szivaccsal, fogászati kesztyűvel vagy ecsettel applikálva. Otthoni használatra is ajánlott, főleg éjjelenként, ujjal felhordva vagy egyéni mélyhúzott sín segítségével.

Kiszérelés


10 tubus/doboz, 5 ízben: sárgadinnye, menta, vanília, eper és tutti-frutti



A zománc demineralizációja (Δ KHN)

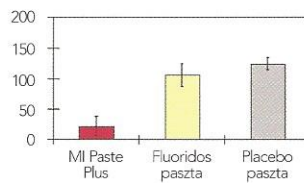

A kalcium és a foszfát koncentrációja (mM)

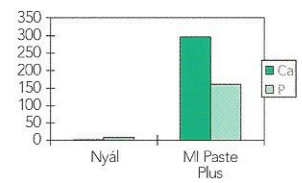


Forrás: S.Kariya, et al., The 82nd General session of the IADR, 2004




Szénsavas italok, savas vagy édes étrend? Védje és erősítse fogait MI Paste Plus-szal




Fogfehérítés? Csökkentse fogai érzékenységét MI Paste Plus-szal

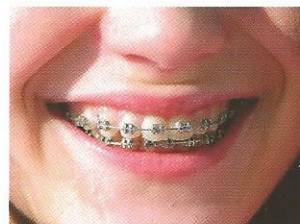

Fogszabályozás? Előzze meg a fehér foltok kialakulását MI Paste Plus-szal

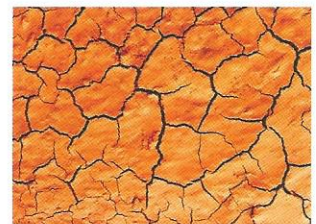

Száraz száj? Fíatalítsa száját MI Paste Plus-szal

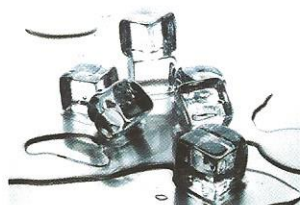

Érzékenység? Csökkentse az MI Paste Plus-szal



Anyja lesz? Védje fogait az eróziótól és érzékenységtől MI Paste Plus-szal

A Recaldent® a Recaldent® Pty Limited engedélyével használt. A CPP-ACP formula kazein származék, laktózt nem tartalmaz. Tejfehérjére és/vagy hidroxibenzoátra allergiás személyeken használata ellenjavallt.

Fluoridtartalma miatt 6 éves kor alatt nem ajánlott. Ebben az esetben használjon GC Tooth Mousse-t.

GC