

MaxCem

Termékleírás

A MaxCem olyan önsavazó, önkötő dual rezin cement, amely lehetővé teszi az indirekt kerámia, kompozit és fém restaurációk előzetes savazás és bondozás nélküli beragasztását. Önsavazó és önrasztó tulajdonságának köszönhetően a MaxCem esetében nincs szükség sem savra sem primere és sem adhezívra! A Maxcem 3,6 mikron átlagátmérőjű részecskékkel 66 tömeg százalékban töltött, röntgenárnyékot adó termék. A dual kötésű anyag dupla fecskendő kiserelése nem csak az anyag automatikus keveredését biztosítja, de egyben azt is, hogy elkerüljük az anyagvesztést, mert így a szükséges mennyiségű anyag közvetlenül a pótlás vagy a fog felszínére juttatható

Használati utasítás

A MaxCem a indirekt kerámia, kompozit, fémkerámia inlayek, onlayek, koronák, hidak és csapok beragasztására alkalmas. Porcelánhéjak beragasztására a termék használata nem ajánlott.

Az anyag használata valamennyi indirekt restauráció esetén (a porcelánhéjak kivételével)

Megjegyzés: A MaxCem olyan önsavazó, önkötő dual rezin cement, amely a végleges indirekt kerámia, kompozit és fém restaurációk előzetes savazás és bondozás nélküli beragasztását teszi lehetővé. A szükséges mennyiségű anyag közvetlenül a pótlás vagy a fog felszínére juttatható

Övintézkedések: Ellenőrizze, hogy a laborból kapott restauráció ragasztandó felszínére elő lettek-e készítve a beragasztásra.

1. Távolítsa el az ideiglenes restaurációt.
2. Az OptiClean forgóeszközzel (vagy az Ön által megválasztott egyéb tisztítási módszerrel) távolítsa el az ideiglenes maradványokat és cementréteget a preparáció helyéről.

Megjegyzés: Csak eugenol-mentes ideiglenes cementet szabad használni. Az eugenolt tartalmazó ideiglenes ragasztóanyagok használata gátolhatja a MaxCem polimerizációs folyamatát.

3. Végezzen alapos öblítést.
4. Gyégeden fújja le a preparációt (de ne szárítsa ki).
5. A tökéletes illeszkedés érdekében próbálja be a restaurációt.
6. Válassza ki a MaxCem cement kiválasztott színeit.

7. Helyezze fel a keverőcsúcsot a dual fecskendőre. Az applikáció előtt légtelenítse a fecskendőt. Új fecskendő használatakor nyomjon ki egy kis mennyiségű anyagot egy papírlapra és azt dobja ki.
8. Az anyag felvitele a következők szerint történhet:
 - Inlay/Onlay** – a cementet közvetlenül az üregi preparációba juttassa be úgy, hogy az minden felszínre befedjen. A pótlást illessze rá finoman a preparációra úgy, hogy a cement minden oldalról lefolyhasson.
 - Korona** – a cementet közvetlenül a pótlásra vagy a fog preparációba juttassa be úgy, hogy az minden felszínre befedjen. A pótlást illessze rá finoman a preparációra úgy, hogy a cement minden szélről lefolyhasson.
 - Csap** – készítse elő a csap helyét. Végezze el a csap méretezését és illesztését. Vigye fel a cementet a csapra. Illessze be a csapot és enyhe mozdításával, rezegtetésével távolítsa el az esetlegesen bennszorult levegőt. Hagyja, hogy a cement lassan kifolyjon a csatornából.

Megjegyzés: Az anyag felviteli ideje 2 perc; a megszilárdulási idő 3 perc (szájhőmérsékleten).
9. A restauráció megfelelő beillesztése után távolítsa el a felesleges cementet. A felesleges cement a legjobban a még meg nem szilárdult, gél állapotban távolítható el scalerrel, depurátorral. A gél állapot eléréséhez a felesleget 2 másodpercen át kell polimerizálni, vagy a felvitelt követő 2-3 percen keresztül hagyni kell magától polimerizálnia. Ha a gél állapot eléréséhez a megvilágítást választja, akkor is hagyja megvilágítás előtt a Maxcemet 1 ½ percig zavartalanul kötni, mert a legjobb eredmény csak így garantált.
10. A felesleges cement eltávolítása után polimerizálja az összes felületet – beleértve a széleket is – 20 másodpercen keresztül*.
11. A proximális helyekhez használjon finírozó csíkot. A szélek polírozásához használjon KerrHawe Identoflex Gloss Plus korongot, kelyhet vagy hegyet. A ragasztóanyag végleges magas fényének megadásához használjon Identoflex HiLuster Plus Dia polírozót.
12. Ellenőrizze az okklúziót.

Tárolás és eltarthatóság

Szobahőmérsékleten tárolandó. MaxCem csak a csomagoláson jelzett lejárati időpontig használható fel.

***Ajánlott polimerizációs időtartamok:** L.E.Demetron I, 10 másodperc. Optilux 501 lámpával és turbó fényvezetővel gyors (boost) üzemmódban 10 másodperc, normál üzemmódban 20 másodperc. Minden más lámpa esetén a gyártó utasításait kell követni.

VIGYÁZAT: A kipolimerizálatlan metakrilát műgyanta kontakt dermatitist okozhat és a

érintkezése kerülendő. Bőrre vagy szembe kerülése esetén azonnal le kell öblíteni bő vízzel.

MEGJEGYZÉS: Az automix hegyek egyszer használatosak.

Korlátozott garancia – A Kerr cég felelősségének korlátozása

A Kerr cég – akár szóbeli, akár írásos – szakmai tanácsainak célja a fogorvosok segítése a Kerr termékek használatában. Ezek a tanácsok nem terjesztik ki a Kerr cég korlátozott garanciáját, illetve nem mentesítik a fogorvost azon kötelezettség alól, miszerint a Kerr termékek esetében mindig meg kell vizsgálni az adott felhasználási célra vagy eljáráshoz való alkalmasságot. A Kerr termékek helytelen használatából származó összes kockázat és kártérítési felelősség a fogorvost terheli.

Gyártási vagy anyaghiba esetén a Kerr cég felelőssége – a Kerr cég választása szerint – a hibás termék vagy termék rész cseréjére, vagy a hibás termék tényleges költségének visszafizetésére korlátozódik. Ennek a korlátozott garanciának az érvényesítése érdekében a hibás terméket vissza kell juttatni a Kerr céghez. A Kerr cég semmilyen esetben sem vállal felelősséget a közvetett, alkalmoszerű vagy következményes károkért.

A FENTIEKBEN FOGLALT KONKRÉT RENDELKEZÉSEKEN KÍVÜL A KERR CÉG SEMMILYEN – KONKRÉT VAGY BELEÉRTETT – GARANCIÁT NEM VÁLLAL, BELEÉRTVE A TERMÉKLEÍRÁSRA, MINŐSÉGRE VAGY EGY ADOTT CÉLRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT IS.