



mikroqid[®] sensitive liquid

Alkoholmentes, gyors behatású felület fertőtlenítőszer, kvaterner ammónium vegyület alapú készítmény.

Amit nyújt

- Használatra kész, azonnal felhasználható oldat;
- Széles mikrobiológiai hatásspektrum;
- Nagyon gyors behatású és hatékony;
- Szolid, friss illat;

Alkalmazási terület

- Orvosi műszerek (CE 0297) és egyéb felületek fertőtlenítésére.
- Különösen alkalmas alkoholra érzékeny felületekre (pl. akrilüveg és ultrahangos vizsgáló fejek).

Behatási idők és alkalmazási módok

Mikroorganizmusok	Behatási idők
Baktericid, fungicid (a VAH/DGHM* lista rövid behatási időre vonatkozó irányelve alapján)	5 perc
Burokkal rendelkező vírusok esetén (beleértve HIV, HBV és HCV)	1 perc
BVDV	1 perc
Rotavírusok	1 perc
Vaccina	1 perc

* Német Higiénikusok és Mikrobiológusok Társasága

Mikrobiológiai hatásspektrum

A mikroqid[®] sensitive liquid hatékony

- baktériumok,
- gombák,
- vírusok (pl. HBV, HCV, HIV, rotavírus, vaccina) ellen.

Termékleírás

mikrozyd® sensitive liquid

Termék adatok

Összetétel:

100 g oldatban:

- 0,26 g kvaterner ammónium vegyület,
- 0,26 g didekil-dimetil ammónium klorid,
- benzil-C12-C18-alkildimetil,
- kloridok.

Kémiai / fizikai adatok

Megjelenés	tiszta, színtelen folyadék
Hőstabilitás	-5°C - +40°C
Fajsúly (20°C)	kb. 0,998 g/cm ³
Viszkozitás	< 15 másodperc (DIN 53 211)
pH érték	kb. 6,0 - 8,0
Robbanáspont	< 61°C (CIN 51 755)

Kiszerezési egységek

Kiszerezési egységek	Csom.egységek	Cikkszám
1 l flakon	10 x 1 l	165715
5 l kanna	1 x 5 l	109193

Alkalmazás módja

A mikrozyd® sensitive liquid azonnali használatra kész oldat. Töményen alkalmazzuk tárgyakon, felületeken majd hagyjuk kifejteni hatását. Győződjön meg, hogy a felületek teljesen át vannak nedvesítve. Ha szükséges távolítsa el a felesleges mennyiséget egy eldobható kendővel.

Különösen alkalmas alkohol érzékeny felületekre (pl. plexiüvegre és ultrahangos traszducerre).

Figyelmeztetés

- Védőkesztyű használata javasolt.
- Használja óvatosan a fertőtlenítőszert!
- Mindig olvassa el a címke információit, mielőtt használná!
- Gyermekek elől elzárva tartandó!

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Kiszerezési egységek	Csom.egysége k	Cikkszám
Szórófej 1 literes flakonhoz	1 db	180124
Kifolyócsap 5 l-es kannához	1 db	135501
Kannakulcs 5-10 l-es kannához	1 db	135810

