

OPALESCENCE ENDO

Orvosi fogfehérítő anyag, deivitalizált fogak fehérítéséhez

 **ULTRADENT**
PRODUCTS, INC.

Az Opalescence Endo 35% hidrogén-peroxid tartalmú anyag, amelyet speciálisan a gyökérkezelt fogak ún. „walking bleach” módszerrel történő fehérítéséhez fejlesztették ki. Az Opalescence Endo 3-5 napon keresztül a fog belsejében hagyható, az anyagot a testhőmérséklet aktiválja.

Használata:

- Elszíneződött gyökérkezelt fogak fehérítéséhez, amely konzervatív megoldást nyújt indirekt pótlásokhoz viszonyítva
- Használható önmagában, vagy az Opalescence otthoni fehérítőrendszerrel együtt.

Jellemző tulajdonságai és azok előnyei:

- Paszta állagú, ezért könnyen behelyezhető a pulpakamrába.
- Magas 35% hidrogén-peroxid tartalma lehetővé teszi a gyors fehérítést.
- Mivel 3-5 napig aktív marad a pulpakamrában, nincs szükség az anyag gyakori cserélésére és a beteg visszarendelésére.
- Az anyag előre bekevert és a fecskendőből könnyen adagolható, ezért használata idő-és anyagtakarékos, valamint csökken az anyag kiömléséből eredő sérülések veszélye.

Eljárás:

A gyökérkezelt fogak fehérítésekor nagyon fontos, hogy ne kerüljön a fehérítő anyag az alveolus szélének szintje alá, valamint az, hogy a gyökércsatornát előzetesen le kell szigetelni.

1. Ellenőrizze röntgenfelvételen a gyökértömés megfelelő széli záródását és az alveolus szélének magasságát.
2. Tájékoztassa a beteget az elérhető esztétikai eredményről a kezelés előtt.
3. Távolítsa el az összes tömőanyagot a trepanációs nyílásból a röntgen alapján megállapított mélységig. Ahhoz, hogy a fehérítőanyag kapcsolatba kerülhessen a fog belsejével a teljes fedőtömést- illetve részben a gyökértömést is el kell távolítani.
4. Szigetelje le a gyökércsatornát 1 mm vastag, kémiaiilag kötő üvegeionomer cementréteggel.
5. Erősítse fel a fecskendőre a White Mac véget, és juttassa az Opalescence Endo-t a trepanációs nyílásba. Hagyjon kb. -1,5 mm-es helyet az ideiglenes tömés számára. Ne kerüljön az anyag a lágyszövetekre. Ha ez mégis előfordulna, mossa le azonnal bő vízzel.
6. Zárja le a trepanációs nyílást eugenol-mentes ideiglenes tömőanyaggal. Javasoljuk az Ultra-Temp használatát. A tömés behelyezése után ellenőrizze az oclusiót. A korai érintkezés miatt a tömésben törés keletkezhet, ami a fehérítőanyag kiszivárgását eredményezheti.
7. Ismételje meg a fentiekben leírt eljárást 3-5 naponta, a kívánt eredmény eléréséig.
8. Távolítsa el az ideiglenes fedőtömést és a fehérítőanyagot egészen az üvegeionomer cement rétegegig. Öblítse át és tisztítsa ki a trepanációs nyílást. Végezze el a kavitás helyreállítását a megfelelő adhezív eljárással.

Óvintézkedések:

1. A várható, kismértékű színvisszaesés miatt ajánlatos a fogat enyhén túlfehériteni.
2. Az anyagot tilos injekciós formában beadni.
3. Az eltarthatóság érdekében az anyagot hűtőszekrényben kell tárolni. Ne tegye ki az anyagot hőnek vagy közvetlen napfénynek.
4. A kiürült fecskendőket a megfelelő módon kell eldobni.
5. Gyermekek elől elzárva tartandó.
6. Ne használja az anyagot olyan páciensnél, aki ismerten allergiás vagy érzékeny a peroxidra, carbopolra, glicerinre stb.
7. Tartsa távol az Opalescence Endo-t a lágyszövetektől.

GYERMEKEK ELŐL ELZÁRVA TARTANDÓ.

GYÁRTJA:
Ultradent Products, Inc.
505 West 10200 South
South Jordan, Utah 84095
USA

FORGALMAZZA:
ADC Kft.
1085, Budapest
József krt.23.
Tel/Fax: 282-8909
adc@adc.hu
www.adc.hu