

Opalescence®

● ● ● go



Opalescence Go 6%

Eldobható sínes fogfehérítő 6%-os hidrogén-peroxid tartalommal

- Az új, UltraFit sín különösen kényelmes és minden fogívhez könnyen hozzáidomul
- A molárisokra is kiterjed, így a hátsó fogak fehérítését is biztosítja
- PF formulát (kálium-nitrát és fluorid) tartalmazó fehérítőzselé. A kálium-nitrát bizonyítottan érzékenységsökkentő hatású, a fluorid megelőzi a fogszuvasodást és erősíti a zománcot. Együttesen átfogó védelmet nyújtanak a fogak számára.
- 6%-os koncentráció, menta ízesítés – 60-90 perces viselési idő 10 napig
- Az előre megtöltött sín a csomagolásból kivéve azonnal használatba vehető
- Optimális mennyiségű zselé, a kezelés végén könnyen eltávolítható


10 napos fehérítés

előtt és után:



Használata:

1. Tárolja hűtőszekrényben a terméket, használat előtt vegye ki és hagyja, hogy szobahőmérsékletű legyen. Vegye ki a sínt a csomagolásból, „U” jelzéssel van ellátva a felső fogsín, „L” jelzéssel az alsó.

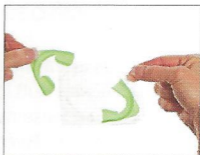

2. Igazítsa középre a fogíven.




3. Gyakoroljon enyhe szívóhatást a sínre vagy nyeljen.



4. Távolítsa el a külső sínt.



5. Ismételje meg a szívást vagy nyelést és finoman nyomkodja a sínt a fogakra.

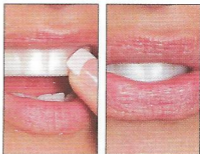

6. Viselje 60-90 percig a sínt, majd dobja el és mosson fogat.



ELŐVIGYÁZATOSSÁGOK:

1. Az anyag gyermekek elől elzárva tartandó.
2. A fogfehérítés előtt fogászati szűrés ajánlott. Némely fog elszíneződése más fogászati beavatkozás szükségére utalhat. Porcelán koronák, héjjak és tömések nem fehérednek ki.
3. Csakis egészséges fogínnnyel rendelkező pácienseken használható. Parodontális betegségekkel rendelkező pácienseknél, fogíny irritáció léphet fel.
4. Ez a fogfehérítő NEM éjszakai használatra lett kialakítva.
5. Alkalmanként, a fog némely része hamarabb vagy kevésbé egyenletesen fehéredik ki a többi fogakhoz képest. Az eredmény egyénenként változó. A népesség kb. 5%-a egyáltalán nem reagál a fogfehérítésre. Nagy amalgám töméses fogak fehérítése estén, a fog transzparenciája megváltozik, így a tömés láthatóbbá válhat.
6. A magas citromsav tartalmú ételek / italok fogyasztásától a fogak érzékennyé válhatnak.
7. Ne étkezzen vagy dohányozzon a fogsín viselése alatt.
8. Ne használja, ha terhes vagy szoptat.
9. Ne nyelje le az anyagot, nagy mennyiségben lenyelve ártalmas lehet.
10. Ne tegye ki a fogfehérítőt hőnek/napfénynek. Ne tárolja mélyhűtőben.
11. Szembe ne kerüljön!

A páciensek kis százaléka érzékenységet tapasztal a fogfehérítés alatt, amely általában enyhe és átmeneti. Néhány esetben érzékenység csökkentő anyag használata szükséges lehet. Ha jelentős érzékenység lép fel, hagyja abba használatát és forduljon fogorvosához. Az anyaggal és a fogfehérítéssel kapcsolatos kérdéseivel kérjük forduljon fogorvosához.

Gyártó: **Ultradent Products, Inc USA**
Importőr: **ADC Kft.**