



terralin® protect

Alkoholok, kationaktív vegyületek és nemionos tenzidek újszerű kombinációján alapuló **aldehidmentes felülettisztító és fertőtlenítő koncentrátum.**

Amit nyújt

- Elsőrendű higiénés védelem;
- Kiváló tisztító és szennyoldó tulajdonságok
- Szolid, kellemes és friss illat;
- már az új európai előírásoknak megfelelően tesztelve.

Alkalmazási terület

Alkalmazható gyógyászati eszközök (CE 0297) és minden mosható felület fertőtlenítésére és tisztítására minden olyan környezetben, ahol fontos a higiéniai biztonság, mint például:

- minden kórházi területen,
- különösen szag érzékeny területeken (pl.: intenzív osztály, műtő),
- problémás, érzékeny felületeken (pl.: akrilüveg),
- kritikus / érzékeny gyártási területeken (pl.: gyógyszeripar, kozmetikai ipar).

Koncentrációk és behatási idők

Behatási idő / Alkalmazási módok	5p	15p	30p	60p	2óra	4óra
Felületfertőtlenít és kórházakban és rendelőkben (beleértve MRSA) a DGHM ¹ és a VAH ² szerint tesztelve		2% 20ml/l		0,5% 5 ml/l		0,25% 2,5 ml/l
TBC ³					0,5% 10 ml/l	0,25% 2,5 ml/l
Retrovírusok ellen ⁴ (HBV, HCV, HIV)		1% 10 ml/l		0,5% 5 ml/l		
BVDV		0,25% 2,5 ml/l				
Vaccina		1% 10 ml/l		0,5% 5 ml/l		
Rota vírus		0,25% 2,5 ml/l				
Papova SV 40		0,5% 5 ml/l				
Adeno vírus						2% 20 ml/l
Noro vírusok ⁵				0,5% 5 ml/l		
Füldőkádak fertőtlenítésére	Koncentrátum					

¹ A Német Higiénikusok és Mikrobiológusok Társasága (DGHM) által kidolgozott új teszt eljárásoknak megfelelően

² VAH = Alkalmazott Higiénia Német Egyesülete

³ szuszpenziós tesztben

⁴ Robert Koch Intézet által meghatározott irányelvek alapján – Német Egészségügyi Közlöny (2004/01).

⁵ helyettesített calici vírussal tesztelve

 A terralin® protect az EU normáknak megfelelően az ipari, élelmiszeripari és intézményi területeken a következő behatási időikkel tesztelt: 60 perc		
EN 1276:	Szérumterhelés alatti baktericid hatás	0,5% (5 ml/l)
EN 1650:	Szérumterhelés alatti fungicid hatás	0,5% (5ml/l)
EN 13697:	Mennyiségi felületi teszt baktericid hatásra	0,5% (5ml/l)
EN 13697:	Mennyiségi felületi teszt fungicid hatásra	0,5% (5ml/l)

Mikrobiológiai hatásspektrum

A terralin® protect

- baktericid (MRSA, TBC is),
- fungicid,
- virucid (HBV, HIV, Rota-, Adeno vírus) hatással rendelkezik.

Termék adatok

Összetétel

100 g oldatra vonatkoztatva:

- 22 g benzalkoniumklorid (benzyl-C12-18-alkyldimethylammonium, chloride),
- 17 g 2-fenoxi-ethanol,
- 0,9 g aminoalkylglycine (amines, n-C10-16-alkyltrimethylenedi),
- További komponensek az (EC) No. 848/2004 irányelveinek megfelelően: 5-15% anionos tenzid, parfüm.

Kémiai / fizikai adatok

Megjelenés	tiszta, zöld folyadék
pH érték (koncentrátum)	kb. 8,6
pH érték (0,5%-os oldat)	kb. 8-9
Sűrűség (20°C)	kb. 1,01

Alkalmazás módja

Készítsük el a kívánt koncentrációjú munkaoldatot.

A pontos koncentráció eléréséhez használjuk a S&M adagolást segítő kiegészítő eszközöket.

Munkaoldattal benedvesített ronggyal töröljük át a fertőtlenítendő felületet (gyógyászati segédeszközök, padlók, csempék, egyéb mosható felületek). Ügyeljünk a kezelt felület egyenletes benedvesítésére.

Mivel a termék kationaktív összetevőket tartalmaz, keverése más tisztító vagy ápoló szerekkel, hatással lehet a termék mikrobiológiai hatásosságára, és problémát okozhat a kezelt felületen. Kérjük, hogy keverék oldatok alkalmazása előtt, kérdezze meg a Schülke&Mayr képviselő véleményét.

A terralin® protect kiváló tisztítóhatással rendelkezik, így normál körülmények között nem szükséges egyéb tisztítószer alkalmazása. Padló felületektől függően, szükséges lehet padlóápoló szerek alkalmazása.

Kiszerezési egységek

Kiszerezési egységek	Csom.egységek	Cikkszám
2 literes flakon	5 x 2 l	181605
5 literes kanna	1 x 5 l	181612

Adagoló segédeszközök / tartozékok

Kiszerezési egységek	Cikkszám
Adagolófej 2 literes flakonra (adagolás 20 ml)	183401
Adagoló pumpa (5 és 10 l-es kannához)	117101
Kannakulcs (5 és 10 l-es kannához)	135810
Csapa szerelhető keverő adagoló	630515

Veszélyes anyagokra vonatkozó rendelet szerinti jelölés

Koncentrátumra vonatkozó adatok:

- C:** Maró
- R22:** Lenyelve ártalmas!
- R34:** Égési sérülést okoz!
- S26:** Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni!
- S36/37/39:** Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szemvédőt kell viselni!
- S45:** Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni! Ha lehetséges a címkét meg kell mutatni!

Figyelmeztetés

Az Európai Unió egészségügyi és munkavédelmi előírásainak megfelelően védőkesztyű használata minden esetben kötelező, bármiféle fertőtlenítőszer használata esetén, ami nem kézfertőtlenítésre szolgál.

Soha ne használja a szert a csomagoláson, feltüntetett lejárati idő után!

Gyermekek elől elzárva tartandó!

Élelmiszerektől elkülönítve tartandó!

A gyártó ajánlásán túl más tisztító- és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!