




# VÉRZÉSCSILLAPÍTÁS

## Ultrapak® Retrakciós Fonal Ultrapak® Retrakciós Fonal Epinephrin-nel impregnálva

Az Ultrapak retrakciós fonal 100% pamutból készült. A láncszemekhez hasonlóan összekötött hurkok nagyobb mennyiségű hemostatikus/retraktív anyagot képesek felvenni, mint a hagyományos sodort/fonott fonalak (kb.2.5-szer). A fonal ott marad, ahova behelyezte. Mindig a szükségesnél vastagabb fonalat használjon, mert az Ultrapak nyomás hatására összepréselődik. Ez biztosítja, hogy a fonal subgingiválisan megmaradjon, állandó nyomást gyakoroljon az ínyre és megkönnyítse a maximális retrakciót.

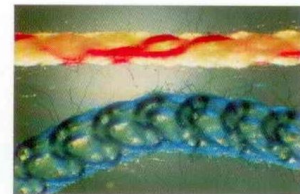

Egy hagyományos és az Ultrapak fonal mikroszkópikus felvétele

### Kiszerezés: Ultrapak

- UP-137 Ultrapak 000
- UP-136 Ultrapak 00
- UP-131 Ultrapak 0
- UP-132 Ultrapak 1
- UP-133 Ultrapak 2
- UP-134 Ultrapak 3



### Epinephrines

- UP-197 Ultrapak E 00
- UP-198 Ultrapak E 0
- UP-199 Ultrapak E 1
- UP-200 Ultrapak E 2



1. A subgingivális preparálás után az íny erősen vérzik.
2. A ViscoStat-ot erősen be kell dörzsölni a sulcusba a Dento-Infusor véggel.
3. Az erős víz/levegő spray eltávolítja a koagulumfelesleget és egyben teszteli a vérzéscsillapítás sikerességét is.
4. A ViscoStat-ba áztatott, Ultrapak hurkolt retrakciós fonalat elegendő 1-3 percig a sulcusban hagyni.
5. A fonal eltávolítása után a sulcust erős víz/levegő spray-vel le kell mosni, majd le kell leszárítani.
6. A vérzéscsillapítást követő sulcuscisztigítás után kiváló minőségű, pontos lenyomat vehető.